



Quick guide

Patientstol kontrol

Kontrolpanel	
<p> Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse. Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.</p>	
<p>Ryglæn ned så længe du trykker (manuelt)</p>	<p>Ryglæn op så længe du trykker (manuelt)</p>
<p>Stol ned så længe du trykker (manuelt)</p>	<p>Stol op så længe du trykker (manuelt)</p>
<p>Stol til autoposition</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> <p>Rinsing position</p> <p>Position A</p> <p>Position B</p> <p>Position C</p> <p>Position D</p> </div>	
Flexy-knap	
<p>Stol til skylleposition</p>	<p>Hvis aktiveret af service tekniker</p>
Fodkontrol	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Stol til autoposition A</p> <p>Kort aktivering</p> <p>Lang aktivering</p> <p>Ryglæn ned</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Stol til autoposition C</p> <p>Kort aktivering</p> <p>Lang aktivering</p> <p>Stol op</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Stol til autoposition B</p> <p>Kort aktivering</p> <p>Lang aktivering</p> <p>Ryglæn op</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Stol til autoposition D</p> <p>Kort aktivering</p> <p>Lang aktivering</p> <p>Stol ned</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Stol til skylleposition</p> <p>Stol til skylleposition</p> </div>	

Unit funktioner

Kontrolpanel

 Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse.  Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.

Vandglasfylder og fontæneskyl

Kort aktivering



Vandglaspåfyldning så længe der trykkes (manuelt)

Lang aktivering

Fontæneskyl

Kort aktivering



Forprogrammeret døråbner / assistent kaldefunktion

Kort aktivering



Døråbner / assistent kaldefunktion så længe der trykkes (manuelt)

Lang aktivering

Operationslampe Tænd ► Sluk

Kort aktivering



Juster intensiteten af operationslampen (manuelt)

Lang aktivering

Operationslampens komposittilstand Til ► Fra

Kort aktivering



Operationslampens intensitet i komposittilstand (manuel)

Lang aktivering

Start ønsket timer



→ Vælg timer nummer

Vedligeholdelses procedure



→ Vælg procedure

Fodkontrol


Intet instrument aktiveret

Kort aktivering

Forprogrammeret døråbner / assistent kaldefunktion

Lang aktivering

Døråbner / assistent kaldefunktion så længe der trykkes (manuelt)

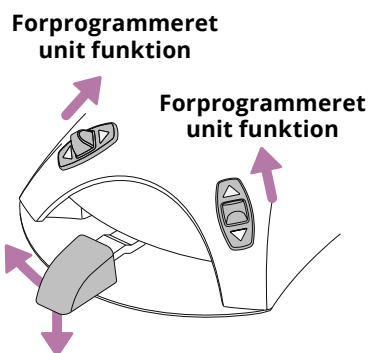

Kort aktivering

Vandglasfylder og fontæneskyl

Lang aktivering

Vandglaspåfyldning så længe der trykkes (manuelt)

Instrument funktioner

Kontrolpanel

Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse. Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.

Automatisk chip blow
Tænd ► Sluk



Fiberoptik
Tænd ► Sluk



Vand & Luft ► Luft
► Ingen spray

100%
A 10



Scaler
Spray 1 ► Spray 2 ►
Ingen spray

Scaler
Skift driftstilstand



Turbine
Effektreduktion
Til ► Fra



Turbine
Quick start
Tænd ► Sluk



Mikromotor
Reverse rotation
Tænd ► Sluk



Mikromotor
Grænse for omdr/min
Tænd ► Sluk



**Kulløs mikromotor
Bien-Air MX2**
Valg af
forudindstilling



**Kulløs mikromotor
Bien-Air MX2**
Momentgrænse
Tænd ► Sluk



**Kulløs mikromotor
Bien-Air MX2**
Skift driftstilstand, når
momentgrænse er Til



Autostop



Auto reverse




Auto forward

Fodkontrol

Unitkontrolleret instrument aktiveret

Mikromotor eller turbine (standardpedal)

Kør instrument

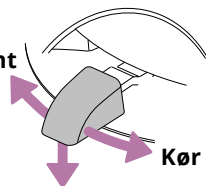

Kør instrument

Kort aktivering


Vand & Luft ► Luft ► Ingen spray

Lang aktivering

Manuel chip blow

Scaler (standardpedal)

Kør scaler

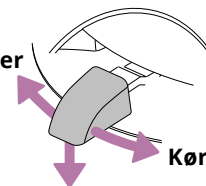


Kør scaler

Kort aktivering

Spray 1 ► Spray 2 ► Ingen spray

Polymeriseringslampe

Start ► Stop

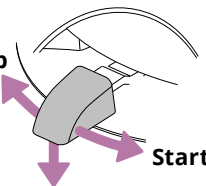


Start ► Stop

Start ► Stop

Intraoral kamera

Aktivér/deaktiver
intraoralt kamera
(standard)

Frys ► Fri af
frysefunktion

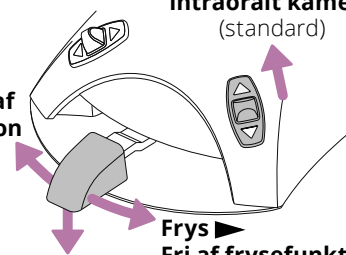

Frys ►
Fri af frysefunktion

Kort aktivering

Gem stilbillede

Planmeca intraoral scanner

Aktivér/deaktiver
instrumentvisning*

Generér model

Aktivér/deaktiver
instrumentvisning*

Vælg
scanningstilstand

Vælg scanningstilstand



Vælg scanningstilstand


Kort aktivering

Start scanning

Lang aktivering

Tag billede

**Forprogrammeret
instrument funktion**

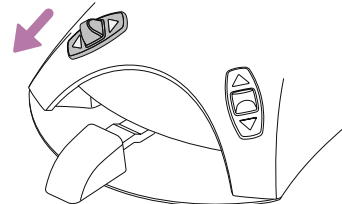

*Hvis aktiveret af service tekniker

Motoriseret nakkestøtte

Fodkontrol

Kort aktivering

Normal program
Tænd ► Sluk

Lang aktivering

Tilt program
Tænd ► Sluk

Normal program **Forlæng nakkestøtte**
Tilt program **Kør nakkestøtte op**

Normal program **Anatomisk bevægelse ned**
Tilt program **Tilt nakkestøtte bagud**

Normal program **Anatomisk bevægelse op**
Tilt program **Tilt nakkestøtte fremad**

Normal program **Reducer nakkestøtte**
Tilt program **Kør nakkestøtte ned**

Programmering

Kontrolpanel

Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse. Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.

Automatiske stolepositionsindstillinger

Funktion er aktiv. Funktion er ikke aktiv.

Kør stolen til ønsket position

Operationslampe Tænd/Sluk

Start programmering

Tryk på stolepositions-knap

Vælg autoposition

Bekræft ny autoposition

Unitindstillinger

Funktion er aktiv. Funktion er ikke aktiv.

De fleste programmeringer følger denne simple frekvens:

Start programmering

Vælg funktion

Juster værdier

Bekræft nye værdier

Instrumentindstillinger

Funktion er aktiv. Funktion er ikke aktiv.

De fleste programmeringer følger denne simple frekvens:

Aktivér instrument

Start programmering

Vælg funktion

Juster værdier

Bekræft nye værdier

Tid- og datoindstillinger

Funktion er aktiv. Funktion er ikke aktiv.

Start programmering

Vælg tid og dato

Vælg funktion

Vælg format

Juster værdier

Bekræft nye værdier